

HOJA DE PRUEBA BOWIE & DICK BD A4

Control Químico Clase 2 para procesos de Esterilización para Autoclave de Prevacio

PRODUCTO: HOJA DE PRUEBA
MARCA: TERRAGENE
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS S.A.S

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS

Hojas tamaño A4 de 80 g/m2
Color inicial: amarillo
Color final: marrón oscuro / negro

NOTA:
Problemas con la evacuación de aire o la calidad del vapor se evidencian como un viraje heterogéneo hacia el marrón oscuro / negro en la hoja de prueba, como zonas más claras en el centro de la hoja.

Ensayo de Bowie & Dick para evaluar la evacuación de aire y la penetración de vapor en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío



PRESENTACIÓN

Caja X 50 Unidades

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30°C antes de su uso, HR 30 - 80 %
mantener al abrigo de la luz. No mojar .

PERIODO DE VIDA ÚTIL

5 años

LEGISLACION APLICABLE

ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-3:2007

HABILITACIÓN

Diseñado bajo sistemas integrados de calidad:
ISO 9001; 2008
ISO 13485; 2012

PELIGROS

No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.

No utilice este producto para el control de la eliminación de aire en procesos de esterilización por Vapor por desplazamiento de gravedad, por Calor Seco, OE u otros procesos de esterilización de baja temperatura.

No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color de la hoja de prueba sea el indicado en el producto y se presente de manera homogénea en toda la hoja de prueba.

TOXICIDAD

No tóxico

USO

Ciclos de 3.5 min a 134 °C



imsumhos

Importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

www.imsumhos.com ventas@imsumhos.com

Cali -Colombia